

Tootetutvustus, otstarve

Näo kaitsemask (kaitsefaktoriga FFP1), mis pakub 80% kaitset õhus lenduvate osakeste eest.

Kasutamishüpped

1. Enne maski puudutamist puhastage käed - peske käed vee ja seebiga, kasutage alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.
2. Asetage mask näole. Veenduge, et mask kataks nina, suu ja lõua.
3. Juhul kui kannate prille, asetage need maski peale.
4. Pärast kasutamist eemaldage mask.
5. Visake mask kohe pärast kasutamist ära.
6. Pärast maski puudutamist või selle eest võtmist puhastage uuesti käed. Võimaluse korral peske ka oma nägu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- Kaitsemaski maksimaalne kandmise aeg on 4 tundi, seejärel on soovitatav maski vahetada, sest selle pealispind võib kanda viirust edasi.
- Maski tuleb vahetada, kui see on niiskunud ja puutunud kokku sekreedi pritsmetega.
- Kindlasti ei tohi sama maski kasutada nii haigete inimeste kui ka beebidega kokku puutudes.
- Maski kasutamisel ja äravõtmisel on oluline käte hügieen – muidu võib saastunud näomask nakatumist pigem soodustada.

Säilitamistingimused

Hoida kuivas, toatemperatuuriga ruumis, kaitstuna otsese päikesevalguse eest.

Seadme ja pakendi sisu

Kaitsemask BIOBASE 50 tk
Standard EN 149:2001+A1:2009
Kaitseklass FFP1"